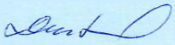


Identifikační číslo	Úroveň a druh dokumentu		Verze	07
PP_LIN_10_07_CES	I.		Dodatky	00
Revize dokumentu	II.		Přílohy	00
1 x za 3 roky	III.	Pracovní postup	Úsek autora	IIB

Příprava zdravotnického prostředku zákazníkem

	Jméno a pracovní pozice	Znaky operativního řízení
Autor	Lenka Kavanová Staniční sestra CES	Účinnost od: 15.2.2025
Přezkoumal	Mgr. Dita Dušková Manažer kvality	
Schválil	Mgr. Marketa Nemšovská Náměstkyně ošetrovatelské péče	Platnost od: 12.2.2025
Uvolnil	Mgr. Dita Dušková Manažer kvality	Podpis: 
Publikace	DMS	
Distribuční skupiny	NLZP CES, COS	
Vyloučené pracovní pozice z distribuční skupiny	0	
Klíčová slova dokumentu	Zákazník, zdravotnický prostředek	

Obsah

1	Úvodní ustanovení.....	3
2	Oblast platnosti.....	3
3	Pojmy, definice, zkratky.....	3
4	Popis zabezpečované činnosti.....	3
4.1	Příprava ZP zákazníkem.....	3
5	Související dokumenty	3

1 Úvodní ustanovení

Předpis definuje proces předsterilizační přípravy a transport zdravotnického prostředku (ZP) na oddělení CES, tento proces musí být proveden v souladu s platnou legislativou.

2 Oblast platnosti

Pro NLZP CES, perioperační sestry

3 Pojmy, definice, zkratky

Dle registru zkratek NPK

4 Popis zabezpečované činnosti

4.1 Příprava ZP zákazníkem

Použitý ZP musí být ihned dekontaminován na pracovišti, které ZP použilo při výkonu.

1. Použitý ZP ihned po ukončení výkonu vložte do připravené dekontaminační nádoby tak, aby byl zcela ponořený v dezinfekčním roztoku, používejte ochranné pracovní pomůcky.
2. ZP složený z jednotlivých částí rozložte tak, aby dekontaminace byla provedená na všech komponentech ZP.
3. Nůžky, peány apod. rozevřete minimálně na 120 stupňů.
4. Dodržte čas expozice použitého dekontaminačního prostředku.
5. Dekontaminovaný ZP opláchněte tekoucí vodou, důkladně osušte a vložte do označeného přepravního boxu Materiál ke sterilizaci, má červenou samolepku a transportujte na CES, kde se umyje.
6. Je povinností zákazníka mít řádně označený box Materiál ke sterilizaci má červenou samolepku, označení na víku. Označení musí být čitelné, nesmazatelné a dezinfikovatelné.
7. Zákazník vyplíše elektronickou žádanku na oddělení v KIS. Žádanka přijde na CES do IS MEDIX. Žádanka musí obsahovat: záznam o dekontaminaci, název oddělení, název ZP, počet kusů, požadavek mytí nebo je ZP čistý, popř. změnu počtu obalů.
8. Vyplňte dvojmo Požadavek na sterilizaci, (1x CES archivuje po dobu 3 let, 1x kopie pro zákazníka slouží pouze jako provozní doklad). Na žádance zákazník vyplní název materiálu, počet kusů, jednoobal nebo dvojbal, dekontaminaci, mytí a druh sterilizace.
9. Druh sterilizace je zanesen do číselníku IS MEDIX dle určení jednotlivých oddělení. Druh sterilizace je uveden v návodu od výrobce ZP. Návod si ukládá každý zákazník na svém úseku. Zákazník je odpovědný za správnost určení sterilizace a správnost informace, kterou o tomto předá pracovníkovi CES. Pověřený pracovník CES, který má přístup do číselníku do něho zanese předanou informaci o ZP.
10. ZP - obvazový materiál, štětičky se nepřijímají ke sterilizaci, nejsme výrobcí ZP (nařízení MDR).
11. Nový ZP musí zákazník zasílat s kopií návodu ke sterilizaci doporučený výrobcem.
12. **Zdravotnické prostředky, které nejsou určeny ke sterilizaci nebo resterilizaci v žádném případě nesterilizujeme. Takový požadavek hodnotíme jako nežádoucí událost.**
13. Vysterilizovaný materiál bude vydán do boxu „Box na sterilní materiál“, označený modrou samolepkou.

5 Související dokumenty

PP_LIN_04_09_CES_F_01_Požadavek na sterilizaci (pro externí zákazníky)